

Reinigungs- und Pflegehinweise für Schienen

Dentallabor
SEITNER.



Für Ihr Wohlempfinden und auch Ihre Mundgesundheit, können Sie durch richtige Pflege Ihrer Schiene einen wertvollen Beitrag leisten.

Folgende Hinweise sollen Sie hierbei unterstützen.

Grundsätzlich können Sie Zahnschienen mit klassischer Seife, Kernseife und Flüssigseife oder Spülmittel reinigen. Keine stark parfümierten Seifen benutzen!

Dazu eignet sich eine mittelharte bis weiche Zahnbürste.

Nicht geeignet sind alkoholhaltige Reinigungslösungen und Zahnpasta, da diese Schleifkörper enthält. Mundspülungen können Verfärbungen verursachen und **Wasser mit einer Temperatur von 50 ° C und höher kann die Schiene verformen!**

Hat die Schiene mit der Zeit einen unangenehmen Eigengeruch angenommen, so legen sie diese für eine Stunde in eine nicht parfümierte, konzentrierte Seifenlösung. Alternativ sind Reinigungstabletten die in Wasser aufgelöst werden, wie z. B. Oxydens von Erkodent, sehr empfehlenswert. Danach sehr gründlich mit Wasser abspülen. Dadurch werden die meisten geruchsbildenden Bakterien beseitigt.

Empfehlung:

- **Vor dem Einsetzen** die Zähne reinigen und die **Schiene mit Wasser abspülen**.
- **Nach dem Gebrauch** der Schiene, diese gut **mit Wasser abspülen** und **mit Zahnbürste und Seife die Innen- und Außenseite gründlich reinigen**. Alternativ dazu können Sie **Oxydens gemäß Anleitung** anwenden. **Erneut mit Wasser abspülen**. Wasser abschütteln oder mit einem Handtuch **abtrocknen**.
- **Nie trockenföhnen!** Hier besteht Verformungsgefahr!
- Sehr wichtig, **die Schiene komplett trocknen lassen! An einem trockenen Ort aufbewahren**, am besten in einer Zahnbox mit Lüftungslöchern.

Ihr Dentallabor Seitner 